


# Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

## Haití



Enjoy mobility.

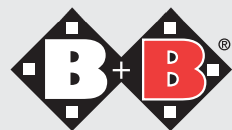

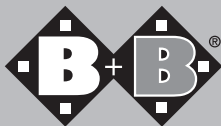

## **Haití**

### **(Asiento de pared plegable)**

#### **Estimado cliente:**

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que le facilitará el cuidado en casa. Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

#### **1. Declaración de conformidad**

En calidad de fabricante del producto, B+B declara que el asiento de pared plegable Haití cumple íntegramente los requisitos de la directiva 93/42/CEE

#### **2. Información para la utilización del producto**

El asiento de pared plegable está exclusivamente diseñado para sentarse durante el baño.

### **3. Finalidad de uso - Indicaciones**

Inestabilidad/incapacidad de mantenerse en pie por una menor utilización o una falta de funcionalidad de las extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a causa de enfermedades malignas, así como enfermedades pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) combinado con una debilidad postural del tronco.

### **4. Atención: indicaciones de seguridad, análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485**

- Se requiere la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.
- Ajuste las 2 bases a la misma altura.
- Asegúrese de la correcta colocación de los botones de bloqueo.
- Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al fijar la superficie de asiento en el armazón del asiento.
- La superficie de asiento solo sirve para sentarse.
- Al plegar el asiento, cójalo por el armazón lateral, y no por la superficie de asiento.

- Placa de soporte
- Manual de instrucciones
- Pinza de sujeción
- Asidero
- Armazón del asiento
- Pieza de fijación
- Asiento

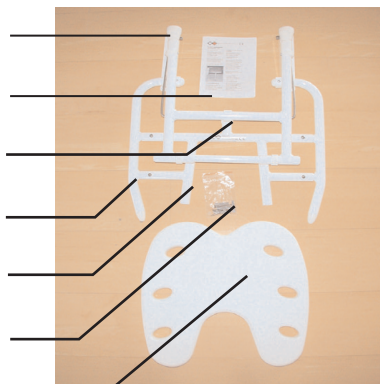


Fig. 1

## 5. Cómo montar el asiento de pared plegable

Primero ajuste las bases del asiento a la altura correcta. El asiento se pliega y las placas de soporte se montan en la pared de forma que la superficie de asiento del Haití adopta la posición horizontal al plegarse.

Marque en la pared las posiciones de los orificios de la placa de soporte, realice los orificios y monte el asiento en la pared usando los tacos y tornillos.

Atención: primero ajuste la altura del asiento deseada (punto 7).

El montador debe escoger los tacos de pared en función del tipo de pared.

Antes de montar las placas de soporte, extraiga los asideros del armazón del asiento. Para ello desenrosque los tornillos autorroscantes de 15 mm (véase la fig. 2) situados debajo del armazón del asiento y extraiga las pinzas de bloqueo (véase la fig. 3).

Al montar el asiento, tenga en cuenta que la superficie de asiento no puede estar inclinada hacia delante (así se evitan resbalones hacia delante) y que solo puede estar ligeramente inclinada (2°) hacia detrás.



Fig. 2



Fig. 3

## 6. Cómo montar la superficie de asiento

El asiento encaja a presión en el armazón (véase la fig. 4).

Si para limpiar el asiento plegable tiene que extraer la superficie de asiento, sujete el asiento por el asidero y tire de la superficie de asiento hacia arriba (véase la fig. 5).

Atención: para extraer la superficie de asiento, este tiene que estar plegado.

## 7. Cómo ajustar la altura del asiento

Es posible ajustar la altura de ambas bases (intervalo de ajuste de 10 cm, 5 niveles).

Para ello extraiga las pinzas de bloqueo y coloque la pierna en la posición deseada.

Una vez ha conseguido la altura deseada, vuelva a insertar las pinzas de bloqueo en el orificio correspondiente (véanse las figuras 6 y 7).

Atención: las dos bases deben ajustarse a la misma altura.

## 10. Cómo fijar el asiento plegado en la pared

Para fijar el asiento plegado en la pared, este se encaja en las pinzas de sujeción con el armazón de la base.

## 11. Datos técnicos

- 120 kg de capacidad de carga máxima
- An./al./pr. (en mm): 495/455-555/475
- Peso: 4,9 kg
- Altura del asiento: 455-555 mm en 5 niveles mediante la pinza
- Anchura/profundidad de la superficie de asiento: 400/400 mm
- Resistencia al calor: hasta 125 °C
- Color: azul o blanco

Pinzas de bloqueo



Fig. 4

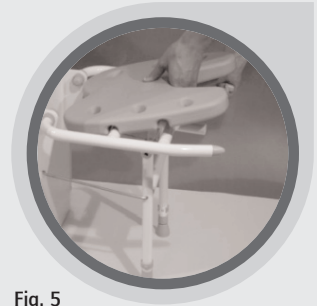


Fig. 5



Fig. 6

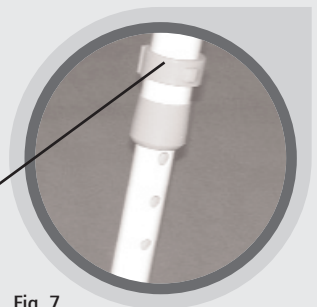


Fig. 7

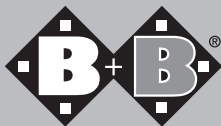


Fig. 8

## **8. Limpieza y desinfección del asiento de pared plegable**

Limpie y desinfecte el asiento solo con productos convencionales.

## **9. Cómo montar los soportes**

La pinza de sujeción se monta previamente en el armazón del asiento (véase la fig. 8).

## **12. Herramientas de ajuste y reparación**

- 1 × destornillador de cruz
- 1 × llave angular de cabeza hexagonal n.º 5

## **13. Fijación**

- 4 × tornillos autorroscantes de cabeza plana St 5 × 60

## **14. Identificación del producto**

El armazón del producto lleva un adhesivo identificativo en el que figura el nombre del producto, el número de serie, el peso máximo del usuario y la dirección de la empresa.

## **15. Garantía**

Solo se asumirá la garantía si el producto ha sido utilizado en las condiciones indicadas y para los fines previstos. El producto debe devolverse en el embalaje original.

## **16. Suministro del equipamiento de serie**

- 1 × armazón Haití (montado junto)
- 1 × superficie de asiento
- 4 × tornillo autorroscante de cabeza plana 5 × 60

## **Certificado de garantía**

(Observe nuestras condiciones generales)

**Modelo:** Asiento de pared plegable Haití

**Número de serie:\***

(debe anotarlo el comercio especializado)

**Distribuidor:**

**Fecha y sello**

\* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

## **MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.**

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

## **el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

