

MANUAL DE USO DEL ANDADOR DE ALUMINIO ECO



El Andador Rollator está diseñado para ofrecer al usuario el máximo de independencia y seguridad. Su diseño preensamblado no requiere de herramientas y permite utilizarla de manera inmediata omando en cuenta breves indicaciones.

Recomendado para personas de hasta 120 kgs.

INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN

1. Saque el Andador de la caja y despliéguela completamente, presionando hacia abajo las dos bisagras que se encuentran a sus costados.
2. Coloque la canastilla sobre el tubo central del Andador y baje el asiento hasta que quede paralelo al piso.
3. Inserte los tubos (macho) con los frenos izquierdo y derecho en los tubos receptores superiores (hembra) del chasis del andador y ajustelos con el ajuste a la altura que considere ideal para Usted. Puede seleccionar uno de los niveles provistos para esta función.

NOTA: Asegúrese de apretar firmemente los ajustes una vez los frenos están a la altura deseada.

El andador cuenta con un freno en cada rueda trasera que puede ser utilizado de manera independiente o simultánea. Los frenos de seguridad de su andador pueden dejarse accionados para evitar que se ruede sola en superficies con algún grado de inclinación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpie su Andador Rollator con un pañuelo húmedo y después séquela con un paño limpio.

En caso de no utilizar su Andador por un tiempo prolongado puede simplemente plegarla y almacenarla, no requiere mucho espacio.