



## IMPORTANTE

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

1. Use solo en modo alternante cuando el colchón esté en posición supino (página 8 del manual de uso del Serene)

#### B. Presión Alterna

- El ciclo alterno de celdas 1-en-2 consigue un alivio periódico de la presión. El aparato permite elegir entre cuatro ciclos de tiempo. Los cuidadores pueden seleccionar uno de los cuatro ciclos de tiempo de acuerdo con el confort del paciente y los resultados deseados.
- **NOTA IMPORTANTE:** Use solo en modo alternante cuando el colchón esté en posición supino.
- **NOTA IMPORTANTE:** Siempre realizar una comprobación manual después de ajustar el nivel de presión para evitar un posible hundimiento.

2. Usar siempre el modo inflado del asiento cuando el paciente está en posición ladeada o inclinado (página 8 del manual de uso del Serene)

#### D. Inflado del asiento

- El inflado del asiento presenta soportes adicionales para el paciente mientras se encuentra erguido para impedir que se hunda.
- **NOTA IMPORTANTE:** Cuando el paciente esté sentado, se recomienda que el cuidador reajuste el nivel de presión para prevenir un posible hundimiento.

3. Una superficie adicional, tal como una colchoneta foam, debe ser utilizada con el Serene (página 10 del manual de uso del Serene).

### 3.1 INSTALACIÓN DE LA BOMBA Y EL COLCHÓN

1. Colocar el colchón sobre el armazón de la cama. Tener en cuenta el pie de cama.

Hay correas de seguridad en la base del colchón. Asegure el colchón firmemente fijando las correas a la estructura de la cama. Asegúrese que las secciones móviles de la cama queden libres y que la cama pueda articular correctamente

**ADVERTENCIA:** Se debe usar el Serene encima de un colchón o con una colchoneta foam.

### 4. RECOMENDACIÓN en modo alternante:

- Para una persona con un peso entre 70-80kgs la configuración del nivel de presión debería ser el 4.
- Para una persona con un peso entre 80-100kgs la configuración del nivel de presión debería ser el 6.
- Para una persona con un peso entre 100- la configuración del nivel de presión debería ser el 7.
- Para una persona con peso superior a 140kgs la configuración del nivel de presión debería ser el 10.



APEX MEDICAL CORP.

HEADQUARTERS:

APEX MEDICAL CORP.

9 Min Sheng St. Tu-Cheng, New Taipei City, 23679, Taiwan, R.O.C.

#### MEDDLE EAST&AFRICA

29,Misr Liltameer Building, Stree#10,AREA#8,  
Sheraton Building,Heliopolis Cairo, Egypt.

TEL:+202-2-2671303

FAX:+202-2-2678649

sunmed@link.net

#### UK

APEX MEDICAL LIMITED

Atlantic House, Imperial Way Reading  
Berkshire RG2 0TD United Kingdom

TEL:+44(0)118 9908 049

FAX:+44(0)118 9036 100

Mobile:+44(0)773 8338 516

sales@apexmedical.org.uk

#### CHINA

APEX MEDICAL (KUNSHAN) CO., LTD

No.1368, ZIZhu Road, Kunshan,  
Jiang Su Province, China

TEL:+86 0512-8617-1660 Ext1150

FAX:+86 0512-8617-8663

sales@apexmedical.com.cn