



**EUROPODEX**  
Fabricante nacional e importador  
de productos sanitarios ortopédicos  
(Nº licencia 4672 P.S.)  
[www.europodex.com](http://www.europodex.com)  
[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

## Cojín viscoelástico con funda de tejido 3D

### Principios de funcionamiento



Resulta más fácil evitar las úlceras de presión que tratarlas. Éstas pueden evitarse cambiando con frecuencia de posición, de tumbado o de sentado, para evitar las tensiones de la piel y minimizar el riesgo de presión en zonas óseas. Entre otras estrategias a aplicar cabe señalar la atención de la piel, las inspecciones regulares y una buena

nutrición. El uso de un cojín de espuma podría ayudar a aliviar la presión y asegurarse de que el cuerpo esté correctamente posicionado en la silla.

### Normas de uso

Respete SIEMPRE el límite de peso que figura en las instrucciones del artículo.

Utilícelo sólo como cojín y de la forma correcta: no se arrodille ni se ponga de pie encima de él.

Pregunte al personal especializado cómo colocar el cojín.





**EUROPODEX**  
Fabricante nacional e importador  
de productos sanitarios ortopédicos  
(Nº licencia 4672 P.S.)  
[www.europodex.com](http://www.europodex.com)  
[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

El cojín Visco3D es un cojín de espuma viscoelástica. La espuma aumenta la superficie de contacto y maximiza el alivio de presión.

Los cojines se suministran con una funda de tejido 3D. Esta tiene una base antideslizante. La espuma viscoelástica se va adaptando progresivamente a la forma del cuerpo, y una vez eliminado el peso, la espuma retoma su forma inicial. También reacciona a la temperatura corporal y a la temperatura ambiente, ablandándose con el calor y ajustándose con mayor facilidad a los contornos del cuerpo.

### **Medidas de seguridad**

Antes de usar el cojín asegúrese de que la superficie donde se vaya a colocar no tenga extremos afilados o puntiagudos que pudieran romper la base de espuma.

No utilice en condiciones extremas de temperatura (por encima de los 38°C o los 100°F o por debajo de los 0°C o los 32°F).

No se deberán realizar modificaciones en el artículo.

Compruebe SIEMPRE si el cojín está correctamente colocado, de forma segura, en su sitio antes de utilizarlo.

Si no fuera a utilizar el cojín durante mucho tiempo, pida a alguien de personal técnico que lo revise antes de volver a utilizarlo.





**EUROPODEX**  
Fabricante nacional e importador  
de productos sanitarios ortopédicos  
(Nº licencia 4672 P.S.)  
[www.europodex.com](http://www.europodex.com)  
[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

## **Limpieza / Desinfección**

Para lavar la funda: Quite la funda del cojín. La funda se puede lavar en la lavadora a 30°C. Séquela siempre en plano, y alejada de cualquier fuente de calor. No utilice detergente ni lejía. No introducir en autoclave.

Para lavar el cojín: Quite la funda. Enjuáguelo ligeramente con un paño húmedo. No utilice jabón, ni lo sumerja en agua. Tras su limpieza asegúrese de que lo seca bien. Vuelva a colocar la funda en el cojín, asegurándose de que la parte posterior de la misma se adapte correctamente a la base de espuma. La etiqueta que tiene la funda va a marcar la parte posterior de la misma. Busque roturas, arañazos y pinchazos en el cojín antes de volver a instalar la funda. Si tuviera cualquier problema, póngase en contacto con su servicio técnico

## **Garantía**

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.





**EUROPODEX**  
Fabricante nacional e importador  
de productos sanitarios ortopédicos  
(Nº licencia 4672 P.S.)  
[www.europodex.com](http://www.europodex.com)  
[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

Distribuido por:

## **EUROPODEX SL.**

Licencia nº: 4672 P.S.

Avenida del Llano nº 57 Gijón

33209 Asturias – ESPAÑA –

TEL. 985990833 FAX. 985 990263

[ventas@europodex.com](mailto:ventas@europodex.com)

[www.europodex.com](http://www.europodex.com)

Fabricado por:

### **EUROBASTÓN SL.**

Poligono Industrial Promosa 7 Bj,

Gijon, Asturias, 33211

