

# MANUAL DE USO RAMPA SKY SALVABORDILLO

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la rampa.

## **Descripción del producto**

Abra la caja de embalaje para comprobar que no se han producido desperfectos durante el transporte. En caso de que se hubieran producido daños contacte con el comercio en el que adquirió el producto.

La rampa ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas de ruedas u otros productos similares.

## **Precaución**

El peso máximo soportado por la rampa es de 270 Kg.

Preste atención a que la rampa no esté mojada, ya que puede volverse resbaladiza. Manténgala limpia y seca para su correcto funcionamiento.

Tenga en cuenta que cuando suba la rampa con una silla o scooter no puede superar el ángulo de inclinación que el fabricante recomienda para su silla.

## **Modelos de rampa**

NOMBRE	REFERENCIA	ANCHO	PESO SOPORTADO
Rampa Sky Salvabordillo 1,5 cm	0401074	14 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 2 cm	0401075	15 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 2,5 cm	0401076	15 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 3 cm	0401077	20 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 3,5 cm	0401078	20 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 4 cm	0401079	20 cm	270 Kg
Rampa Sky Salvabordillo 4,5 cm	0401080	25 cm	270 Kg

## **Montaje**

Saque la rampa de la caja y colóquela contra una superficie plana y nivelada. La rampa ya estará lista para su uso.

## **Mantenimiento**

Para limpiar la rampa utilice un paño húmedo con agua jabonosa. Seque bien la rampa después de limpiarla. No utilice en ella productos abrasivos.

## **Garantía**

La rampa tiene una garantía de 2 años en los defectos de materiales o de fabricación. Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso de que requiera de reparación póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió la rampa.



**Apex Medical S.L.**

C/ Elcano 9, 6ª Planta

48008 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA

tel. +34 944 70 64 08 - fax. +34 944 70 64 09

E-mail: [info@apexmedical.es](mailto:info@apexmedical.es)

Web: [www.apexmedicalcorp.com](http://www.apexmedicalcorp.com) |



**WONSH RAMP INDUSTRY CO. LIMITED**  
15 Nanjin Road, Huangtu Zhen,  
Jiangyin city, Jiangsu Prov.  
P.R. China 214445



MEDevice Union, Ltd  
26 York Street  
London, United Kingdom W1U 6PZ