

# KN95 (Uso Civil)

autofiltrante y anti-partículas, mascarilla desechable



Las mascarillas KN95 están diseñadas para proporcionar protección respiratoria al usuario contra partículas en el aire, como pueden ser polvo y micro-organismos (Virus). Son mascarillas desechables por lo que no son reutilizables. Las mascarillas KN95 son destinadas principalmente a proteger al usuario de particular nocivas en el aire que son lo suficientemente pequeñas para ser inhaladas.

## Precauciones:

- 1: Para asegurar la limpieza de la máscara, evita tocarla con la mano.
- 2: Cuando se ponga la máscara, asegúrese de que esté bien colocada.
- 3: Debes lavarte las manos antes de usar la máscara. Si estas expuesto al polvo, debes usar siempre una máscara.
- 4: Cuando te cueste respirar o cuando la máscara se ensucie o esté dañada, cambia la máscara lo antes posible.
- 5: Esta máscara no se puede lavar, al limpiarlo se daña la estructura del filtro, afectando el rendimiento.
- 6: Las máscaras que no estén en uso deben almacenarse en un entorno limpio.
- 7: Las máscaras no se pueden desinfectar en el microondas

## Modo de uso:

Colocar con las manos lavadas con jabón por parte externa sobre la nariz y boca, sujetar los elásticos a las orejas. Siempre manipular y quitar la mascarilla por los elásticos y finalmente lavarse las manos con jabón.



CE FDA  
EN 149:2001+A1:2009



## Mascarilla compuesta de 5 capas:

1. Tela no tejida
2.  $\geq 99\%$  filtro de no tejidos soplados por fusión / 25g
3.  $\geq 99\%$  filtro no tejido soplado por fusión / 25g
4. Algodón sin cola
5. Tela no tejida



NO USAR SI EL EMBALAJE ESTA DAÑADO



LAS IMAGENES SOLO SON DE EJEMPLO

SIN ESTIRELIZAR

Eficiencia de filtrado de bacterias y partículas.  $\geq 95\%$